

GEBRAUCHSANWEISUNG



Ätzend

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Heben Sie die Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Nur zur äußerlichen Anwendung. Kappe vorsichtig öffnen, üben Sie keine Gewalt aus. Entfernen Sie die Kappe langsam und gehen Sie vorsichtig vor, um eine versehentliche Berührung der Haut mit der Spitze des Stiftes zu vermeiden. Bewahren Sie EndWarts PEN für Kinder unzugänglich auf.

1. Was ist EndWarts PEN und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von EndWarts PEN beachten?
3. Wie ist EndWarts PEN anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist EndWarts PEN aufzubewahren und weitere Informationen

EndWarts® PEN

1. WAS IST ENDWARTS PEN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

EndWarts PEN ist eine wirksame Lösung zur Entfernung von Warzen, die sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen zur Behandlung von Warzen an Händen, Füßen, Ellbogen und Knien angewendet werden kann. EndWarts PEN hilft dem Körper, die Warzen auszutrocknen und abzustößeln. Die Lösung dringt direkt in die Warze ein. EndWarts PEN hinterlässt keine Spuren auf der Haut und ist nicht sichtbar. So können beispielsweise direkt nach dem Auftragen Strümpfe angezogen oder ein Bad genommen werden.

EndWarts PEN ist ein in Schweden patentiertes Medizinprodukt, das die CE-Kennzeichnung trägt und biologisch abbaubar ist. Die Eigenschaften der Lösung verhindern ein Wachstum von Bakterien. EndWarts PEN verursacht bei korrekter Anwendung weder Narben noch führt es zu Infektionen. Der Inhalt von EndWarts PEN reicht für ca. 30 Behandlungen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ENDWARTS PEN BEACHTEN?

2.1 WANN DÜRFEN SIE ENDWARTS PEN NICHT ANWENDEN

- Verwenden Sie EndWarts PEN nicht bei Gesichtswarzen, Warzen im Genitalbereich, Dellwarzen, Muttermalen, Hühneraugen, Hautverhärtungen oder anderen Hautveränderungen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie bezüglich der Diagnose unsicher sind.
- Bedecken Sie die Warze nach der Anwendung von EndWarts PEN nicht mit einem Pflaster. Die Verwendung eines Pflasters nach der Anwendung von EndWarts PEN kann zu Hautschäden führen, siehe 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?
- Verwenden Sie EndWarts PEN nicht, wenn die behandelte Warze empfindlich wird, blutet oder Irritationen auftreten. Dann muss die Behandlung unterbrochen werden, bis sich die Haut erholt hat.
- Verwenden Sie EndWarts PEN nicht in Kombination mit anderen Warzenentfernungsmethoden.
- Verwenden Sie EndWarts PEN nicht, wenn Sie allergisch gegen einen der in Abschnitt 5. genannten sonstigen Bestandteile sind.

2.2 WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN



EndWarts PEN ist **ätzend** und hat einen starken, reizenden Geruch. Nicht einatmen. Nur zur äußerlichen Anwendung. **Bewahren Sie EndWarts PEN für Kinder unzugänglich auf.** Nehmen Sie keine Änderungen an dem Stift vor (nicht öffnen, nicht aufschneiden, nicht durchstechen).

Nicht zu viel auftragen! Übermäßige oder fehlerhafte Anwendung kann Schmerzen und Hautschäden verursachen, siehe 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

- Wenn Sie eine größere Menge angewendet haben, als Sie sollten, oder versehentlich die umgebende Haut berührt haben, diese sofort mit reichlich Wasser abspülen, um Hautschäden möglichst gering zu halten.
- Sollte das Mittel in die **Augen** gelangen, diese sofort und wiederholt mindestens 15 Minuten lang mit reichlich handwarmem Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, entfernen Sie diese sofort und spülen Sie Ihre Augen wie beschrieben.

Seien Sie besonders vorsichtig bei der Behandlung empfindlicher Haut, z. B. bei kleinen Kindern oder auf dem Handrücken, siehe 3.1 DOSIERUNG UND ANWENDUNG und 3.2 BEHANDLUNG VON KINDERN.


3. WIE IST ENDWARTS PEN ANZUWENDEN?

3.1 DOSIERUNG UND ANWENDUNG

EndWarts PEN wirkt bereits beim Auftragen sehr geringer Mengen. Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, da die Lösung ätzend ist. Um den Kontakt mit der umgebenden Haut zu vermeiden, seien Sie vorsichtig und halten Sie den Stift während des Auftragens der Lösung gut fest. Setzen Sie die Kappe nach Gebrauch wieder korrekt auf.

Die Spitze des Stiftes gibt eine kleine Menge der farblosen Lösung ab, wenn diese auf die Warze gedrückt wird. Die Spitze kann trocken erscheinen und es ist schwierig zu sehen, wie viel Lösung auf die Warze aufgetragen wird. Der Stift ist so gestaltet, dass nur die für eine Behandlung der Warze notwendige Menge der Lösung austritt. Sie können vor der Anwendung testen, ob der Stift funktionsfähig ist, indem Sie die Spitze des Stiftes leicht auf ein Papiertaschentuch tupfen. Hier ist dann ein kleiner, feuchter Fleck zu sehen. Beim Öffnen des Stiftes ist außerdem ein beißender Geruch wahrnehmbar.

Abbildung 1

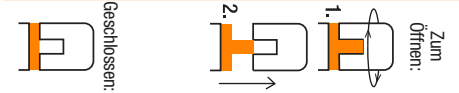

Zum Öffnen die Kappe drehen, bis der orangefarbene Strich auf dem Stift mit der kleinen Einkerbung auf der Kappe eine durchgehende Linie bildet. Dann kann die Kappe sicher vom Stift abgezogen werden. Seien Sie beim Öffnen der Kappe vorsichtig, üben Sie keine Gewalt aus und zeren Sie nicht daran. Die Lösung könnte aus dem Stift austreten. Zum Schließen die Kappe fest auf den Stift drücken und drehen, bis der orangefarbene Strich nicht mehr zu sehen ist. Siehe Abbildung 1 oben.



Fahren Sie mit der Anwendung fort:

- Berühren Sie mit der Spitze des Stiftes leicht die Warzenoberfläche, so dass diese mit der Lösung benetzt wird.
- Nur auf die Warze auftragen. Bedecken Sie die gesamte Warze (Abbildung A).

- Bei großen Warzen kippen Sie den Stift (Abbildung B).

- Drei Sekunden lang anwenden.

- Nicht auf gesunde Haut auftragen.

- Nehmen Sie die Behandlung **regelmäßig** einmal wöchentlich vor, bis die Warze vollständig verschwunden ist.

Abbildung A

Abbildung B



Bei der Behandlung von Warzen auf **dünnere Haut (wie auf der Oberseite von Händen/Füßen/Fingern)**, kann eine einmalige Anwendung jede zweite oder dritte Woche ausreichend sein.

Warzen an empfindlichen Hautstellen, die sich auf dem Hand- oder Fußrücken, auf der Innenseite der Knie oder der Außenseite der Ellenbogen befinden, sollten vorsichtig behandelt werden, um eine Berührung der umliegenden Haut zu vermeiden.

Bei größeren, älteren Warzen, Plantarwarzen und Warzen mit einer dicken Hautschicht kann eine häufigere Anwendung versucht werden.

Wenn sich die Warze bei einmal wöchentlicher Anwendung nicht zurückbildet, behandeln Sie sie zweimal pro Woche oder jeden zweiten Tag, es sei denn, die Haut ist gereizt.

NICHT ZU VIEL AUFTRAGEN – nur für bis zu drei Sekunden und nur auf der Warze anwenden.

Wenn Sie ein Brennen spüren oder eine Reizung bemerken (die Haut wird rot, kribbelt, sticht), brechen Sie die Behandlung ab und lesen Sie Abschnitt 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH? Beginnen Sie die Behandlung erst wieder, wenn die Reizung vollständig abgeklungen ist.

Wenn das Produkt nicht gegen Ihre Warzen wirkt, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Bei der Behandlung **mehrerer Warzen** behandeln Sie bitte in den ersten zwei Wochen nur einige, um zu sehen, wie die Haut reagiert. Wenn die Haut nicht gereizt ist, können Sie danach mit der Behandlung der übrigen Warzen beginnen.

Die Warze sollte zwischen den Behandlungen durch Anwendung einer normalen Körperlotion oder eines Hautöls weich gehalten werden. Dann können die Hautreste der Warze leichter herausgelangen.

Zu Beginn der Behandlung kann die Warze weiß werden und zunächst nach außen wachsen, bevor sie auszutrocknen beginnt. Wenn die Warze wächst, kann die umliegende Haut druckempfindlich werden. Achten Sie darauf, ob die Warze mit einer Hautschicht bedeckt ist. Lesen Sie hierzu bitte weiter.

Sollte sich die Warze empfindlich anfühlen oder pochen, kann das daran

liegen, dass zu viel Warzenmittel aufgetragen wurde, siehe 2.1 WANN DÜRFEN SIE ENDWARTS PEN NICHT ANWENDEN, und/oder dass die Warze nicht in der Lage ist, die Haut über der Warze zu durchbrechen.

Wenn die Haut wie ein Deckel über der Warze liegt, ist sie z. B. mit einer Pinzette zu öffnen, damit die Warze herausgelangen kann. Bei einer alten oder harten Warze den betroffenen Bereich vor der Behandlung in warmem Wasser baden, um die Haut aufzuweichen. Entfernen Sie die Haut über der Warze, z. B. mit einer Pinzette. Bei dicker Haut auf nach innen wachsenden Warzen die harte Haut vorsichtig entfernen. Bei Warzen am Nagelbett kann eine kleine Öffnung in der äußersten Hautschicht erforderlich sein, damit das Mittel in die Warze eindringen kann. Feilen Sie die Warzen nicht ohne ärztliche Anweisung. Die Warzen werden dann möglicherweise druckempfindlich und bilden wieder eine neue harte Oberfläche.

Nach einigen Behandlungen sind meist schwarze Punkte in der Warze zu sehen. Dabei handelt es sich um kleine Kapillargefäße, die sie mit Blut versorgen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Warze abheilt, und die Behandlung sollte so lange fortgesetzt werden, bis die schwarzen Punkte und die Warze vollständig verschwunden sind. Manchmal können die schwarzen Punkte etwas bluten, wenn an der Warze gekratzt wurde. Warten Sie, bis die Blutung aufhört, bevor Sie die Lösung auftragen, da sonst ein leichtes Stechen auftreten kann. Spülen Sie in diesem Fall sofort mit kaltem Wasser, um den Schmerz zu lindern.

3.2 BEHANDLUNG VON KINDERN

Kinder dürfen nur von einem Erwachsenen behandelt werden. Befolgen Sie bitte genau 3.1 DOSIERUNG UND ANWENDUNG, da das Mittel ätzend wirkt. Kleine Kinder haben weiche, dünne Haut. Tragen Sie bei Kinderwarzen nur eine sehr geringe Menge EndWarts PEN Lösung auf. Die Warzen verschwinden in der Regel nach 2–3 Behandlungen.

Kinder **unter 4 Jahren** dürfen mit EndWarts PEN behandelt werden; dabei jedoch immer darauf achten, dass es sich tatsächlich um eine Warze handelt und nicht um eine andere Hautschädigung. Konsultieren Sie vor der Behandlung Ihren Haus- oder Kinderarzt. Bei Kindern unter 4 Jahren ist es besonders wichtig, die zu behandelnde Stelle zu begutachten (Kinder haben eine weiche, dünne Haut) und die Dosis zu verringern. Behandeln Sie in größeren Abständen, z. B. jede zweite bis dritte Woche.

- Berühren Sie mit der Spitze des Stiftes leicht die Warzenoberfläche für 3 Sekunden, so dass diese mit der Lösung benetzt wird.
- Achten Sie darauf, die umgebende Haut nicht zu berühren.
- Falls das Kind dazu neigt, die behandelte Stelle in den Mund zu nehmen, können Sie den betroffenen Bereich nach der Behandlung mit Wasser abwaschen, da das Mittel sofort eindringt.
- Bei Brennen oder Stechen während der Behandlung die Warze mit kaltem Wasser abspülen und kein Mittel mehr auftragen, da dieses bereits die Warze durchdrungen hat.
- Wenn das Kind ein Brennen spürt oder eine Reizung bemerkt (die Haut wird rot, kribbelt, sticht), brechen Sie die Behandlung ab und lesen Sie Abschnitt 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?. Beginnen Sie die Behandlung erst wieder, wenn die Reizung vollständig abgeklungen ist.

3.3 BEHANDLUNG VON DIABETIKERN

Diabetiker sollten EndWarts PEN nur an Warzen an gesunden Hautstellen (nicht durch die diabetische Erkrankung betroffen und geschädigt) und mit besonderer Vorsicht anwenden. Bei Problemen konsultieren Sie Ihren Arzt/ Podologen oder Fußpfleger.

3.4 WIE LANGE DAUERT DIE BEHANDLUNG MIT ENDWARTS PEN?

EndWarts PEN ist nachgewiesen wirksam gegen Warzen. Die meisten Warzen verschwinden, ohne wieder aufzutreten. Zuweilen können bereits unter der Haut liegende Warzen zum Vorschein kommen.

Warzen sind sehr verschieden in Größe und Erscheinung und daher kann die für die Entfernung erforderliche Zeit unterschiedlich lang sein. Die Behandlungsdauer kann variieren: Meist sind 5 bis 15 Behandlungen erforderlich, Abweichungen nach oben und unten sind möglich. Die erforderliche Behandlungsdauer bis zum Verschwinden der Warzen kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, darunter das Alter des Patienten, die Art der Warze, das Immunsystem des Patienten, die Stelle, an der sich die Warze befindet und wie lange die Warze schon existiert. Eine herabgesetzte Immunabwehr und Medikamente wie z. B. Kortison sind Faktoren, welche die Behandlungsdauer verlängern können. Neue Warzen lassen sich meist leichter entfernen als alte. Kinderwarzen lassen sich meist leichter entfernen als Warzen bei Erwachsenen. Bei nach innen wachsenden Warzen und bei Warzen am Nagelbett, die bereits seit vielen Jahren existieren, könnte es länger dauern, bevor Sie feststellen, dass die Behandlung Wirkung zeigt, und es dauert erheblich länger, bevor eine solche Warze vollständig verschwunden ist.

3.5 WANN SOLLTE DIE BEHANDLUNG MIT ENDWARTS PEN BEENDET WERDEN?

Beenden Sie die Behandlung mit EndWarts PEN, wenn keine schwarzen Punkte (sehr kleine Blutgefäße, welche die Warze mit Blut versorgen) mehr sichtbar sind oder wenn die Warze abgefallen oder eingeschrumpft bzw. an ihrer Stelle ein „Loch“ entstanden ist. Die Haut regeneriert sich nach erfolgreicher Behandlung. Setzt man die Behandlung zu lange fort, nachdem die Warze entfernt ist, färbt sich die Haut rosa und wird etwas wässrig. In diesem Fall ist die Behandlung mit EndWarts PEN unverzüglich abzubrechen. Nach einigen Wochen untersuchen Sie die Stelle, an der die Warze saß; ein kleiner Punkt kann darauf hinweisen, dass noch Warzenreste vorhanden sind. Wenn das der Fall ist, sollte die Behandlung erneut durchgeführt werden.

3.6 SCHWANGERSCHAFT UND STILLZEIT

Es sind keine Risiken bei der Anwendung von EndWarts PEN in der Schwangerschaft und Stillzeit bekannt.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

EndWarts PEN enthält eine starke Säure. Wenn Sie mehr Lösung angewendet haben, als Sie sollten, oder die Lösung falsch angewendet haben, können Hautschäden verursacht werden, siehe 2.1 WANN DÜRFEN SIE ENDWARTS PEN NICHT ANWENDEN. Beachten Sie Punkt 3.1 DOSIERUNG UND ANWENDUNG, um Hautschäden zu vermeiden.

Am Anwendungsort kann es zu vorübergehenden Nebenwirkungen kommen, wie z. B. Empfindlichkeit, Stechen, Schmerz, Rötung, Brennen oder Blutung aus den kleinen Gefäßen. Beim Auftreten einer solchen Nebenwirkung unterbrechen Sie die Behandlung, bis die Haut sich vollständig erholt hat.

Wenn Sie mehr Lösung angewendet haben, als Sie sollten, oder die Lösung falsch angewendet haben, können stärkere Nebenwirkungen verursacht werden, wie z. B. Blasen, Wunden, dunkle Pigmentierung der Haut, Verätzung, Entzündung, Nekrose (Gewebestod) oder Narbenbildung. Die geschädigte Fläche sollte sauber gehalten werden zur Vermeidung von Infektionen. Brechen Sie in entsprechenden Fällen die Behandlung ab und kontaktieren Sie bei schweren Hautschäden einen Arzt.

Riechen Sie nicht am Inhalt des Stiftes. EndWarts PEN hat einen starken Eigengeruch und kann die Atemwege und Augen reizen. Nebenwirkungen können z. B. Reizung der Atemwege und/oder des Rachens, laufende Nase, tränende Augen oder Atembeschwerden sein.

In einzelnen Fällen wurde über allergische Reaktionen wie z. B. Rötung, Ausschlag und Juckreiz berichtet.

5. WIE IST ENDWARTS PEN AUFZUBEWAHREN UND WEITERE INFORMATIONEN

Lagerung: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei 15–25 °C lagern, vorzugsweise aufrecht mit der Kappe nach unten.

Inhalt: Ameisensäure, Wasser, Glycerin.

Verpackung: Stift mit Kappe und Gebrauchsanweisung. Die Kappe hat einen zweistufigen Öffnungsmechanismus, siehe 3.1 DOSIERUNG UND ANWENDUNG.

Haltbarkeit: Siehe Haltbarkeitsdatum auf Stift und Karton. Nach Anbruch nicht länger als 6 Monate verwenden.

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2020.



77281299
16457 30WP.MED.DE.AT.1.09

Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra, 9,
20900 Monza, Italien

Vertrieb: Viatris Healthcare GmbH, Lütticher Straße 5, 53842 Troisdorf, Deutschland
Mylan Österreich GmbH (A Viatris Company), Guglgasse 15, 1110 Wien, Österreich

www.endwarts.de
www.endwarts.at

